

Anclaje

LOCATOR

para prótesis removibles



Cómo atornillar el
LOCATOR Implant

Ancladén

Distribuidores desde 1985:



www.ancladen.com

Cómo atornillar el

LOCATOR Implant



Atornille el **Locator** en el implante con el **roscador** del **Core Tool**.

Para prevenir que el **Locator Implant** se afloje, se recomienda apretarlo con un Torque de 30 Ncm.

TW30
Llave de Torque
30 Ncm



8926
Insertador para llave
de Torque. Conexión
cuadrada. 15 mm.



HTT
Adaptador 15 mm.



Locator Implant



Core Tool



Locator Implant



Se puede utilizar cualquier llave dinamométrica de paso cuadrado de 4.0 mm.

