

NUEVO


LOCATOR F-Tx[®]
FIXED ATTACHMENT SYSTEM

COLOQUE Y EXTRAIGA LA PRÓTESIS SOBRE LOCATOR F-Tx[®] CON UNA ÚNICA HERRAMIENTA

COLOQUE

LOCATOR F-Tx HERRAMIENTA DE COLOCACION Y EXTRACCION:

VERSÁTIL: Una única Herramienta para colocar y extraer la Prótesis sobre LOCATOR F-Tx

CÓMODO PARA EL PACIENTE: La Prótesis se coloca y retira de una forma rápida durante las visitas de higiene y mantenimiento


ECONÓMICO: Autoclavable para uso en múltiples pacientes

EXTRAIGA

**ZD ZEST DENTAL
SOLUTIONS[®]**

ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

COLOQUE Y EXTRAIGA DE UNA FORMA RÁPIDA LA PRÓTESIS LOCATOR F-Tx


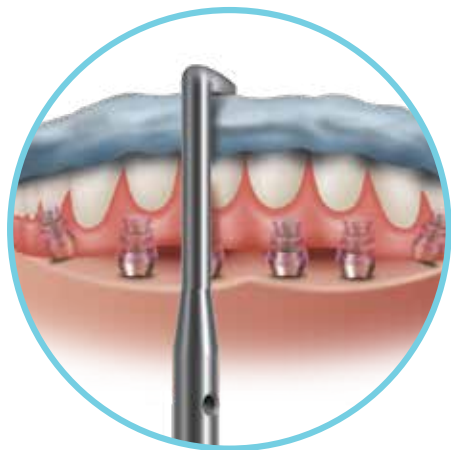


COLOCACIÓN SIMPLE Y SEGURA

- La Herramienta de Colocación y Extracción LOCATOR F-Tx, dispone de un Punta específica para colocación que facilita el acceso intraoral y su posicionamiento encima de cada Abutment para un encaje rápido.
- Simplemente active el mango que genera la fuerza necesaria para garantizar que los Elementos retentivos están totalmente encajados asegurando que la Prótesis esté firmemente anclada.

COMODIDAD PARA EL PACIENTE, EXTRACCIÓN RÁPIDA

- La Herramienta de Colocación y Extracción LOCATOR F-Tx, supone un valioso ahorro de tiempo en la consulta durante las visitas de higiene y mantenimiento permitiendo disponer de más tiempo para otros tratamientos.
- Simplemente pase el lazo de alambre alrededor de la Prótesis y active el mango que genera la fuerza necesaria para desacoplar los Elementos Retentivos de los Abutments.

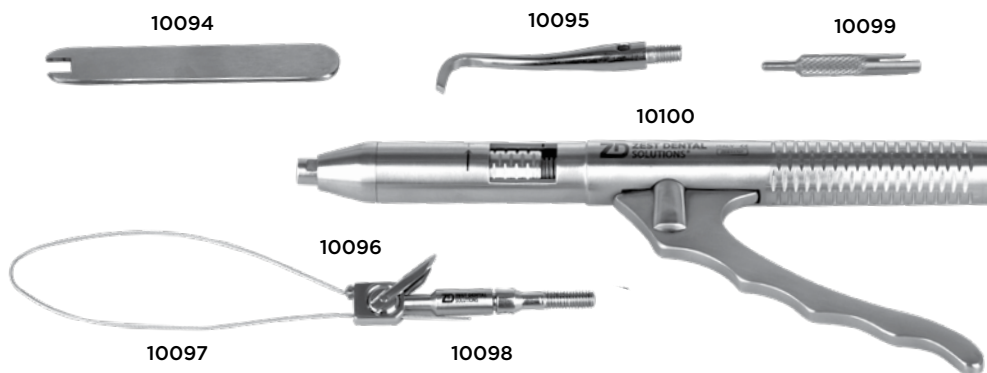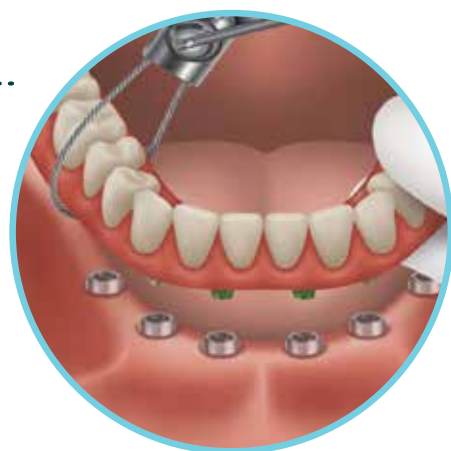

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
10100	LOCATOR F-Tx Dispositivo de Colocación y Extracción. Incluye Herramienta, Punta para colocación, Punta de Extracción con adaptador de rosca, llaves de alambre, palanca y extremo.	239
10095	Punta para Colocación	20
10096	Punta de Extracción con adaptador de rosca	100
10097	Cable de repuesto	20
10098	Adaptador de rosca	20
10099	Llave de Palanca para Alambre	20
10094	Llave de ajuste	13

Ancladén