


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PRODUCTOS ZEST


TÉCNICAS DIRECTAS DE PROCESADO PARA EL SISTEMA DE ANCLAJE PARA PROTESIS REMOVIBLES LOCATOR R-Tx®

La Técnica directa de procesamiento del Sistema de Anclaje LOCATOR R-Tx es un procedimiento delicado, que si no se ejecuta correctamente podría alterar la función y longevidad del Anclaje LOCATOR R-Tx y de la sobredentadura.

A continuación se indican los pasos que deben seguirse al procesar el Anclaje LOCATOR R-Tx directamente en boca.

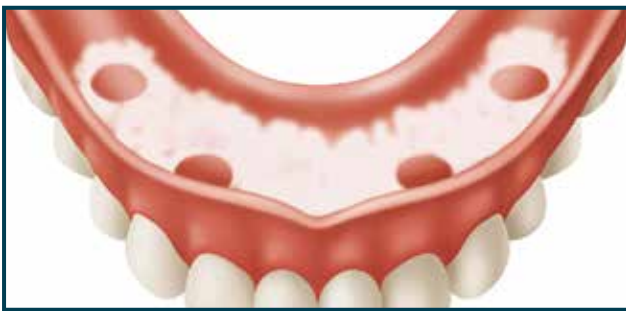

1 Verifique el ajuste pasivo de la sobredentadura sobre los capuchones comprobando que no hay interferencia con el acrílico. Se debe confirmar visualmente con el uso de pasta de marcado.

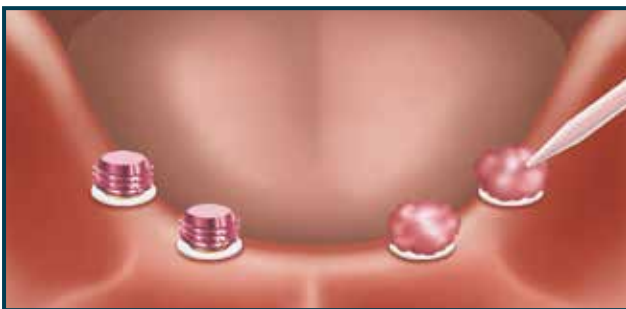

2 Deposite una pequeña cantidad de CHAIR-SIDE "Attachment Processing Material" alrededor de cada Capuchón y en las zonas aliviadas de la prótesis.

También se recomienda practicar un orificio por lingual para eliminar el exceso de material.



3 Asiente la sobredentadura sobre los Capuchones y manténgala en su posición con una **"ligera presión con los dedos"**, únicamente. Siga aplicando una presión bilateral uniforme ligera, mientras el Material CHAIRSIDE fragua. Se puede utilizar una lámpara para acelerar el proceso de curado.

Ancladén

PICK-UP PROCEDURES

- No comprima demasiado el durante el procesado o mientras el Material CHAIRSIDE se ajusta.
- No haga morder al paciente con fuerza durante el procesado.
- Un exceso de presión puede causar un efecto rebote del tejido blando y contribuir al desalojo parcial de la sobredentadura de los Abutments LOCATOR R-Tx.
- Se requiere una ligera presión para garantizar un correcto posicionamiento de la sobredentadura sobre el tejido blando.
- Tampoco es recomendable que la sobredentadura no ejerza presión. Podría causar el fulcro de los Abutments LOCATOR R-Tx, lo que la convertiría en una prótesis implanto-soportada.

HIGIENE Y MANTENIMIENTO


La limpieza es fundamental. Conservar los Abutments LOCATOR R-Tx limpios y sin placa/alimentos/restos garantiza seguridad en la sobredentadura y prestaciones duraderas del Sistema de Anclaje LOCATOR R-Tx.



- 1** Enseñe a los pacientes a cepillarse Los Abutments LOCATOR R-Tx con un cepillo de cerdas suaves. Preste especial atención en la doble retención, -las muescas inferiores deben estar siempre limpias.



- 2** Para una mejor limpieza, se puede utilizar también Hilo dental en las muescas de los Anclajes.

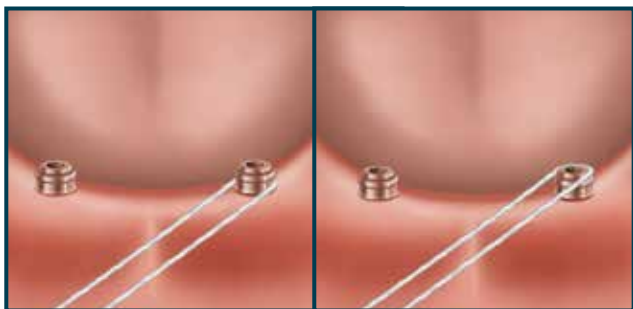

NOTA: Los pacientes que sumerjan la dentadura en disolución de limpieza, deben hacerlo **únicamente durante 15 minutos**. Se pueden usar soluciones como Polident o Efferdent.

Un tiempo excesivo de inmersión puede afectar negativamente a las prestaciones de las Retenciones.

Ancladén